



NEUROMATIX

www.neuromatix.r




home of attention

Оценка тренинга


для home-of-attention silver edition

Для просмотра параметров прошлых сессий:

1. Остановите текущую сессию
2. Нажмите на кнопку оценки

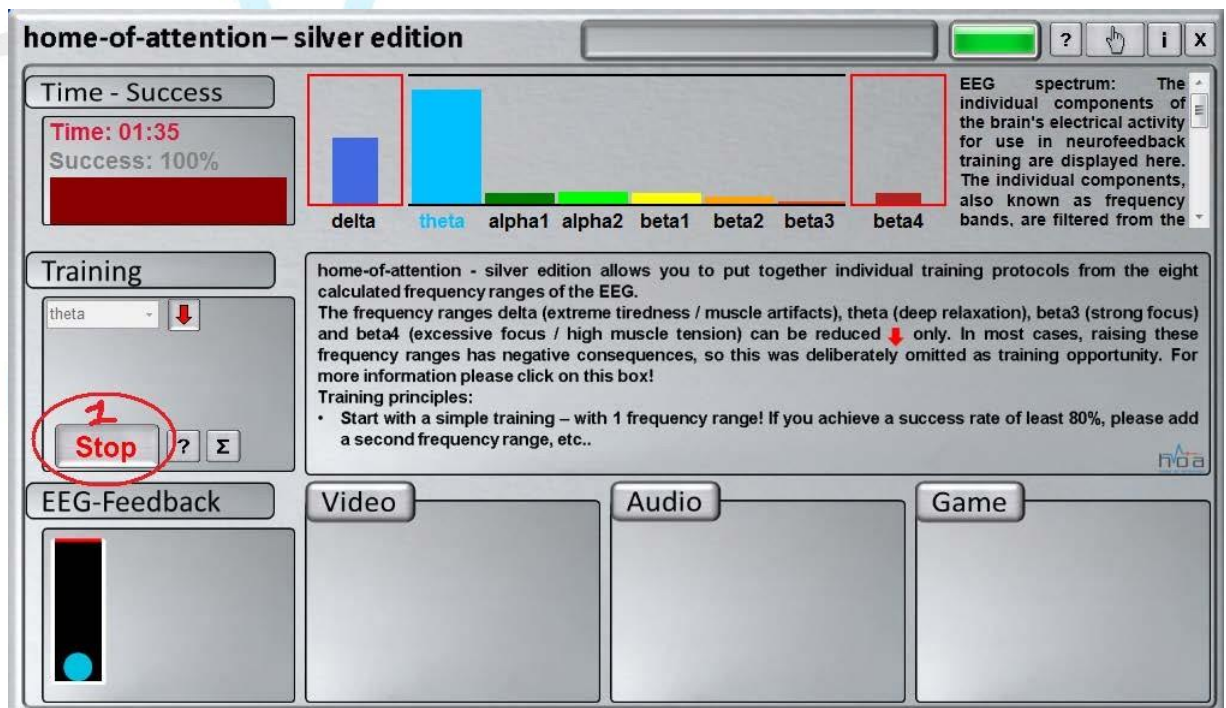

Изображение: остановите сессию

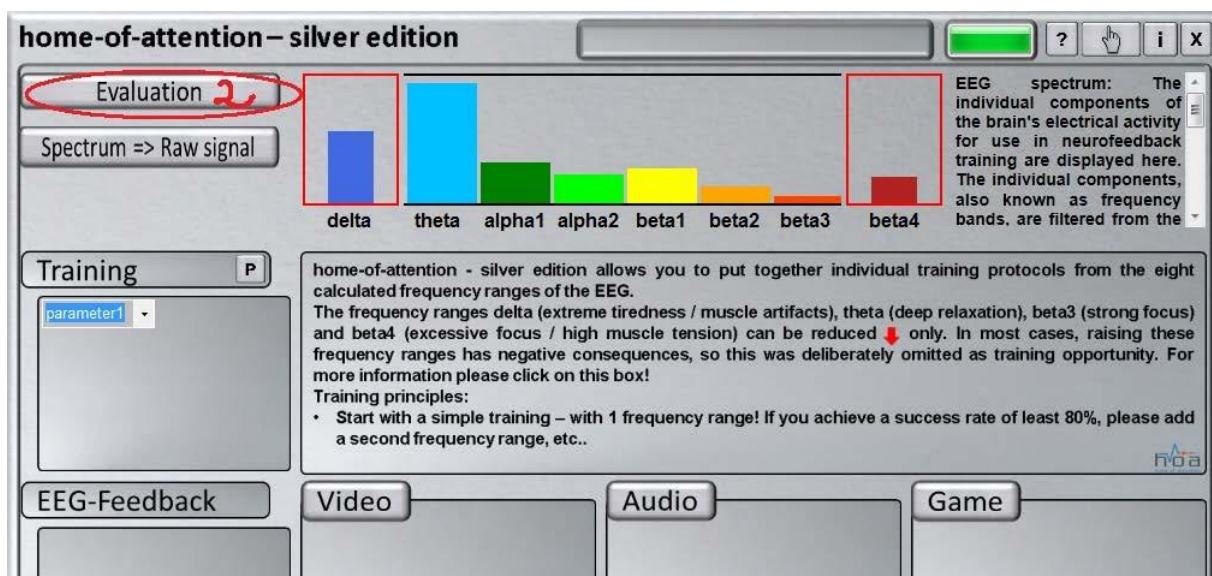

Изображение: нажмите на кнопку оценки

3. Выберите дату сессии
4. Выберите набор данных
5. Выберите желаемые параметры (например, тета, альфа1 и т.д.)
6. Нажмите на кнопку График для отображения графика



Изображение: График

7. Для возврата в обычный режим закройте это окно, выбрав шаг 7 (зеленый кружок)



Изображение: зеленый кружок для возврата в обычный режим

В случае наличия вопросов или проблем свяжитесь с нами:

support@home-of-attention.com

home of attention